




ErgoLine

Массажное кресло

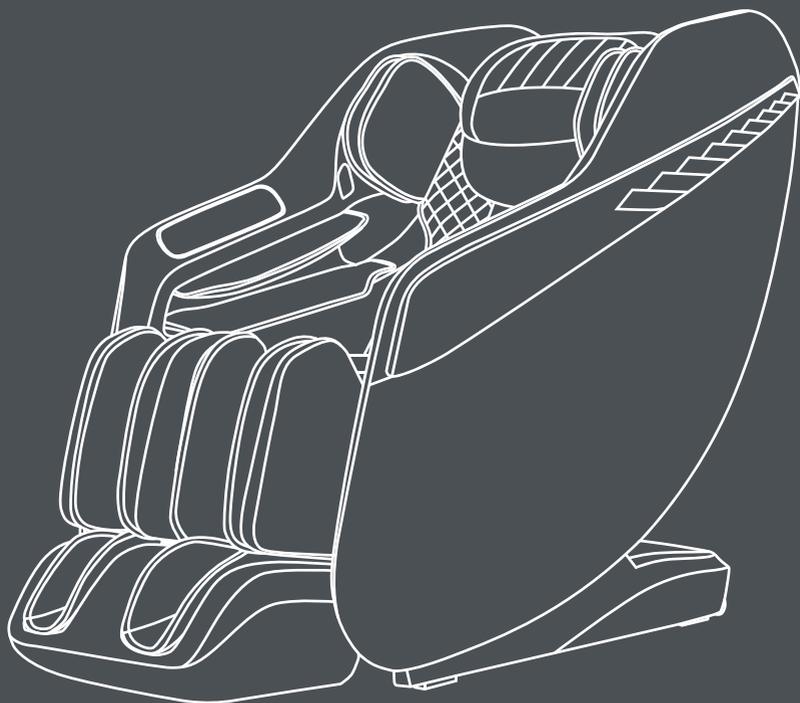

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova ErgoLine! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться креслом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

Меры предосторожности	2
Техника безопасности	3
Сборка кресла	6
Размещение массажного кресла	7
Перед использованием	9
Устройство изделия	10
Инструкция по эксплуатации	13
Очистка и техническое обслуживание	19
Устранение неисправностей	20
Технические характеристики	21

Меры предосторожности

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите все соответствующие инструкции. Приведенные здесь указания помогут вам безопасно и правильно использовать изделие. Для четкого указания степени вреда и ущерба меры предосторожности делятся на "Внимание" и "Осторожно", которые могут быть вызваны ненадлежащим использованием. Оба вида важны для обеспечения безопасности и должны соблюдаться.

Знак	Значение
	Внимание Указывает на то, что ненадлежащее использование может привести к серьезным травмам или летальному исходу.
	Осторожно Указывает на то, что ненадлежащее использование может привести к незначительным травмам или материальному ущербу.
	Запрещено Абсолютный запрет

Следующие группы населения не должны использовать это изделие:

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими особенностями, сенсорными или неврологическими нарушениями, а также лицами с недостаточным опытом и психическими особенностями, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением и проинструктированы по использованию устройства лицами, ответственными за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не использовали устройство для игр.

Пациенты с остеопорозом.

Пациенты с тяжелыми заболеваниями сердца, использующие имплантируемые медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, чувствительные к электромагнитным волнам.

Люди с высокой температурой (выше 38 градусов).

Беременные женщины или вскоре после родов, а также во время менструации.



Люди, которые следуют рекомендациям врача и которым запрещено делать массаж вследствие тромбоза, аневризмы, сильного варикозного расширения вен или других заболеваний системы кровообращения. В течение двух недель после появления тромбов категорически запрещается массировать любые части тела, на которых имеются тромбы.

Пациенты, получившие травму или страдающие кожными заболеваниями.

Детям в возрасте до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии психического расстройства, запрещается пользоваться данным изделием без присмотра.

Люди, которые нуждаются в отдыхе или плохо себя чувствуют, согласно указаниям врача.

Людам с заболеваниями позвоночника или сколиозом запрещено использовать это изделие по рекомендациям врача в связи с другими заболеваниями.

Людам с влажным телом запрещается использовать это изделие.

Данное изделие имеет горячую поверхность. Лица, нечувствительные к нагреву, должны быть внимательны при использовании данного изделия.

Техника безопасности

Важные предупреждения по технике безопасности

Не подпускайте детей к подвижным частям данного изделия.

Используйте надлежащим образом заземленный блок питания, подходящий для данного изделия.

Извлекайте вилку из розетки после использования или перед чисткой, чтобы избежать травм или повреждения изделия.

Эксплуатируйте данное изделие в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руководстве.

Не используйте детали или принадлежности, которые не рекомендуются к использованию.

Не используйте данное изделие на открытом воздухе.

Не используйте вблизи открытого огня, например, печей, и не курите во время использования.

Не используйте на данном изделии обогревательные приборы, такие как электрические одеяла.



Не садитесь на спинку кресла, ножной блок, плечи, подлокотники и не стойте на сиденье.

Внимательно прочтите Инструкции по эксплуатации перед началом эксплуатации.

Никогда не используйте данное изделие для целей, не указанных в руководстве. ☒
Рекомендуемое время разового использования - 20 минут.

Не используйте данное изделие, если чехол или кожа порваны или повреждены.

Не роняйте ничего в данное изделие.

Запрещается засыпать во время использования данного изделия.

Не используйте это изделие, если вы пьяны или плохо себя чувствуете.

Не пользуйтесь изделием в течение часа после еды.

Не используйте данное изделие с чрезмерной силой во избежание травм.

Не используйте для других целей, кроме массажа.

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить специалист производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичного подразделения.

Условия эксплуатации

Не используйте данное изделие в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.



Немедленно прекратите использование изделия, если температура окружающей среды резко меняется.

Запрещается использовать данное изделие в сильно запыленной или едкой среде.

Не используйте данное изделие в небольшом помещении или в местах без надлежащей вентиляции.

Условия хранения



Температура в помещении для хранения: от 5 °С до 40 °С.

Относительная влажность (RH) от 20% до 80%; в хорошо проветриваемом помещении не должно быть агрессивных газов.

Сервис и техническое обслуживание изделия

Данное изделие должно обслуживаться только в сервисном центре, указанном производителем. Пользователю запрещается разбирать или обслуживать изделие без разрешения.

Не забудьте выключить главный переключатель питания после использования.

Не используйте данное изделие, если розетка питания неисправна.

Если данное изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени, необходимо свернуть шнур питания и хранить изделие в сухом и защищенном от пыли месте.

Не храните данное изделие при высокой температуре или вблизи открытого огня. Избегайте длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Пожалуйста, протирайте изделие сухой тканью. Никогда не используйте разбавитель, бензол или спирт.

Не используйте острые предметы, чтобы не повредить изделие.

Не перекачивайте и не тяните данное изделие по неровной поверхности. Вместо этого его следует поднять перед перемещением.

Пожалуйста, используйте это изделие с перерывами. Не оставляйте его включенным непрерывно в течение длительного периода времени.

Решения для устранения обычных неисправностей

Если во время работы данного изделия раздается звук двигателя, это обычный рабочий звук.

Если контроллер не работает нормально, проверьте, надежно ли подключены вилка и розетка питания и включен ли переключатель питания.

По истечении расчетного времени работы данное изделие автоматически активирует кнопку выключения питания; если изделие продолжает работать в течение длительного периода времени, терморегулятор автоматически отключит его. Изделие можно использовать повторно через полчаса.



Техника безопасности

Проверьте, соответствует ли напряжение техническим характеристикам данного изделия.

Никогда не вставляйте и не извлекайте вилку из розетки мокрой рукой.

Не допускайте попадания воды в данное изделие во избежание поражения электрическим током или его повреждения.

Не тяните за шнур питания, подключая его к розетке или извлекая вилку из розетки. Грубое обращение с ним запрещено.



Избегайте повреждений проводки и не вносите изменений в схему данного изделия.

Не протирайте влажной тканью токоведущие части данного изделия, такие как выключатель питания и вилка.

В случае отключения питания держитесь подальше от данного изделия, чтобы избежать травм при внезапном включении питания.

Немедленно прекратите использование данного изделия, если оно работает неправильно, и проконсультируйтесь с местным поставщиком.

Прекратите использование данного изделия, если вы почувствуете недомогание, и проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Сборка кресла





Инструкции по установке ножного блока

После соединения механизма для голени и воздушной трубки массажного кресла жгутом проводов отвяжите ремень, фиксирующий трубопровод, и вставьте соединительную деталь в раму сиденья (Рис. 1).

Закрепите фиксатор ножного блока на круглых трубках с левой и правой сторон голени (Рис. 2).

Повесьте ножной блок с фиксатором на крючок в раме сиденья массажного кресла (Рис. 3).

Закрепите механизм для голени на массажном кресле с помощью 4 винтов М4 (2 слева и 2 справа). Проверьте, нет ли отклонений при повороте вверх-вниз и не загнут ли трубопровод. Установка ножного блока завершена (Рис. 4).

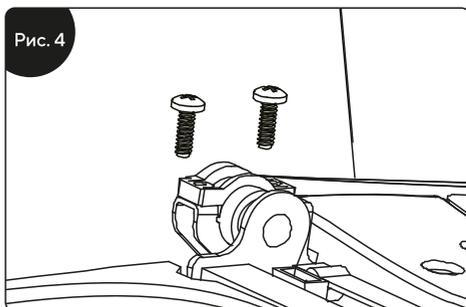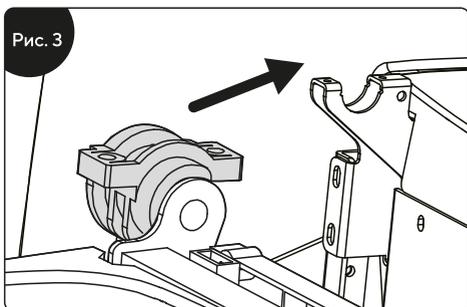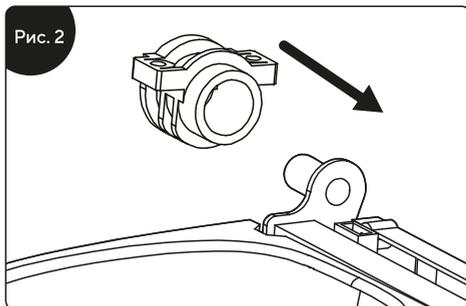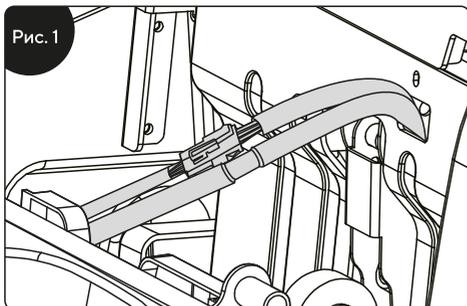


Размещение массажного кресла

Место установки ⚠

Убедитесь, что для массажного кресла достаточно места, минимальное расстояние для установки составляет 15 см от стены.

Не подвергайте массажное кресло непосредственному воздействию высокой температуры (например, перед нагревательным оборудованием) и прямых солнечных лучей. Рекомендуется положить мягкую подкладку для длительного использования в специально отведенном месте. При расположении подкладки ее размер должен быть достаточным для того, чтобы покрыть площадь соприкосновения устройства и ваших ног с полом.

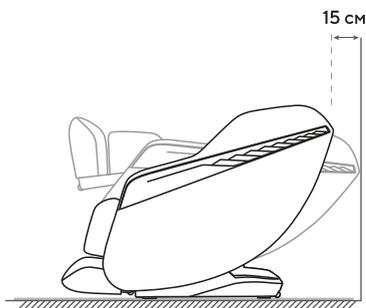


Инструкция по подъему изделия ⚠

Во избежание травм требуется работа нескольких человек по подъему и перемещению кресла.

1. Приподнимайте массажное кресло для его перемещения по уязвимой поверхности, например, по деревянному полу.

2. При перемещении по аналогичному деревянному полу покрытию рекомендуется поднимать устройство. Избегайте повреждения роликов. При подъеме и перемещении над полом в указанное положение, во избежание травм следите за руками и ногами. Не опускайте устройство до тех пор, пока поверхность не станет полностью ровной. Это может привести к повреждению пола. Поэтому рекомендуется постелить на пол коврики.

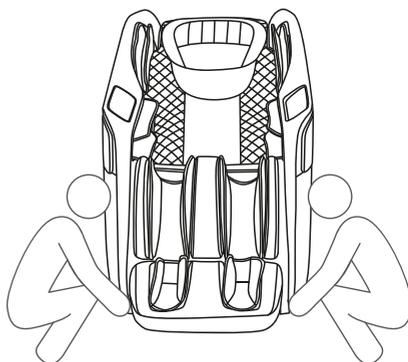


Способ перемещения ⚠

Используйте задние ролики для перемещения массажного кресла. Перемещайте кресло, наклонив его вниз и назад примерно на 45° , как показано на схеме.


ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезмерное усилие, прилагаемое к креслу, может привести к полному опрокидыванию кресла и повреждению изделия.

1. Перед перемещением, выключите устройство должным образом, чтобы перезагрузить его полностью, а затем отключите питание.
2. Оставляйте кресло свободным при перемещении. (Запрещается перемещать кресло с людьми, домашними животными или посторонними предметами).
3. При перемещении не пересекайте препятствия высотой более 2 мм или с зазором более 5 мм.
4. При использовании роликов для перемещения данного изделия единое непрерывное перемещение не поддерживается; если расстояние превышает 50 метров, сделайте так, чтобы это изделие перемещалось медленно и равномерно.

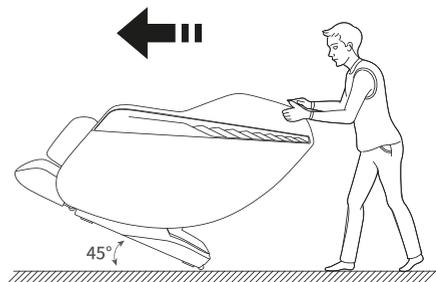

Как разобрать и использовать подушку подголовника и спинку сиденья ⚠


Использование подушки подголовника может снизить интенсивность разминающего массажа шеи и плеч. Поэтому пользователь может решить, использовать ли подушку подголовника в соответствии с его/ее потребностями (рекомендуется использовать подушку подголовника). Подушка спинки и сама спинка соединяются с помощью молнии (1), подушка подголовника и подушка спинки соединяются с помощью молнии (2).

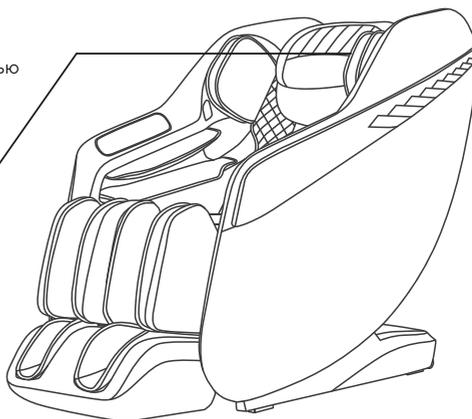

Перед использованием

Осмотритесь вокруг ⚠

Убедитесь, что вокруг устройства нет людей, домашних животных и посторонних предметов.

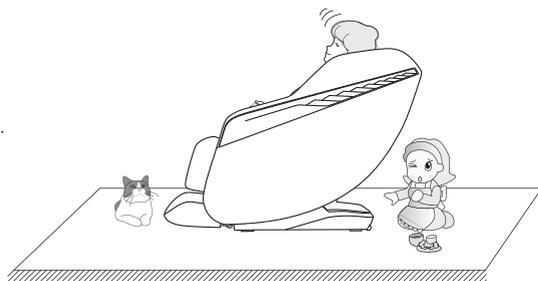


Убедитесь, что в зазорах устройства нет посторонних предметов ⚠


Перед началом массажа убедитесь, что в ногах нет посторонних предметов.

Не допускайте попадания рук, ног и головы в область между механизмом для голени и основным корпусом или в область между подлокотником и капсулой.


Руки, ноги или голова не должны опускаться под ткань или кожаное покрытие массажной зоны.

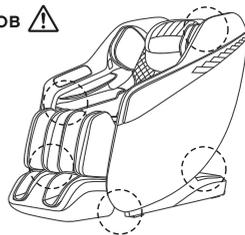


Включение питания ⚠

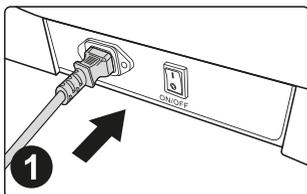

Подключите шнур питания к креслу

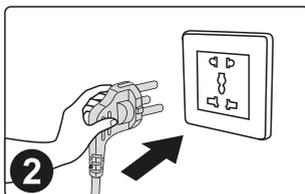

Подключите шнур питания к розетке

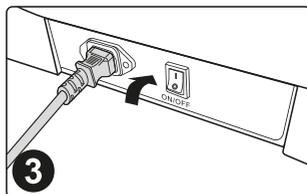

Переведите выключатель питания в положение "I"

Перед использованием проверьте шнур питания и вилку на наличие повреждений.

Подключите питание к данному устройству в соответствии с требованиями к рабочей мощности при калибровке данного изделия.


Категорически запрещается использовать источник питания, отличный от номинального источника питания данного изделия.

Категорически запрещается подключать различные устройства преобразования энергии без разрешения на подачу питания к данному изделию.




Устройство изделия

Описание компонентов

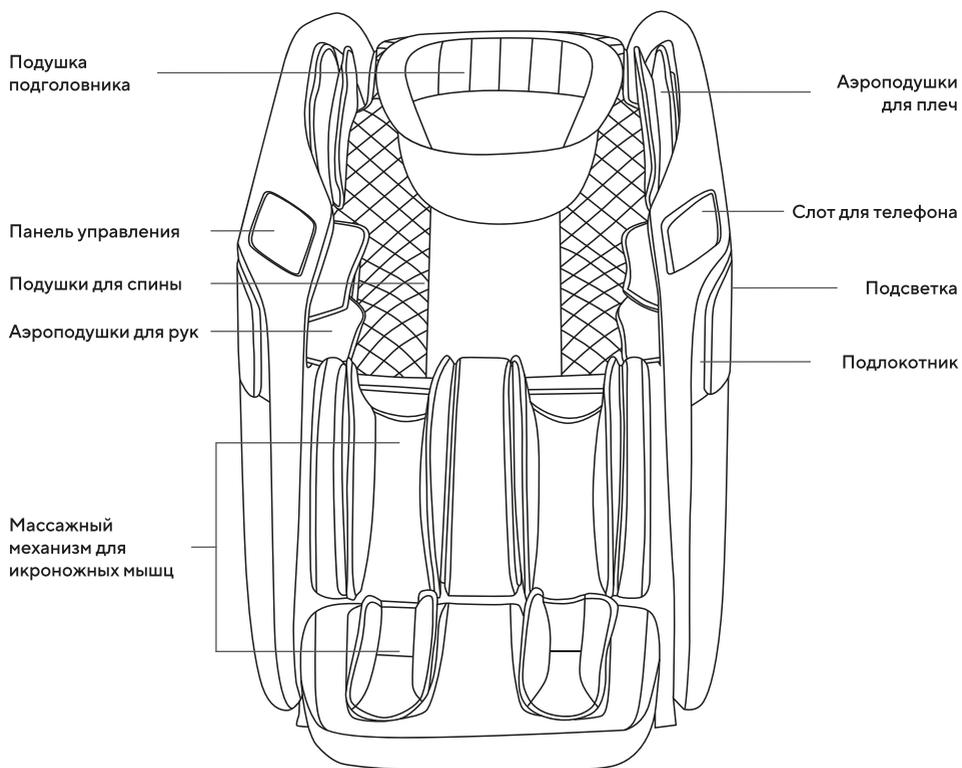

Распределение функций

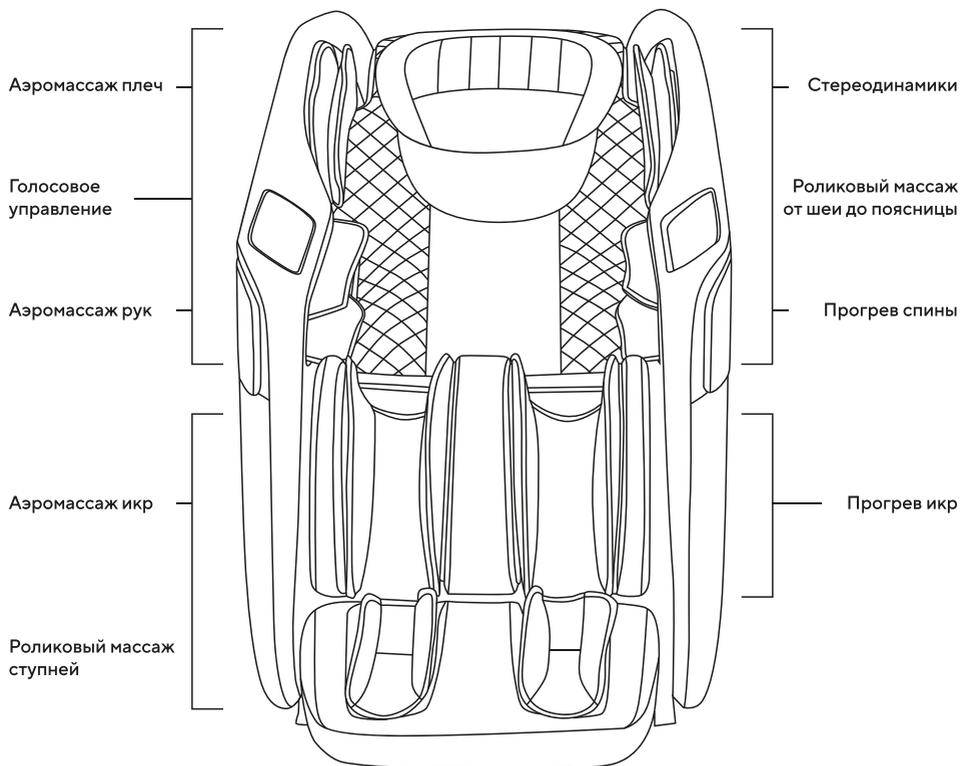

Описание пульта управления

При нажатии на клавиши ручного управления на экране в режиме ожидания (за исключением клавиши включения/перевода в состояние ожидания) экран загорается и переходит в режим ожидания.

После включения можно нажать кнопку поднятия/опускания сиденья, чтобы отрегулировать желаемый угол наклона. Другие клавиши недоступны, за исключением клавиши режима ожидания.



Инструкция по эксплуатации

Начало массажа

Зажмите кнопку питания для включения массажного кресла.

Автоматически регулируется угол наклона.

Автоматически определяется положение плеч человека, поддерживается правильная поза сидя в массажном кресле.

Выполните точную регулировку положения массажных роликов в зоне плеч. Если начальное положение отличается от оптимального положения роликов, установите его в нужное положение с помощью кнопок Вверх и Вниз. Если в течение 10 секунд положение роликов не отрегулировано, автоматически запускается функция массажа.



Отрегулируйте положение массажных роликов вверх так, чтобы они находились в оптимальном положении на плечах.



Отрегулируйте положение массажных роликов вниз так, чтобы они находились в оптимальном положении на плечах.



В процессе определения положения плеч раздается звуковой сигнал ручного контроллера. Одновременно нажмите клавиши "Вверх" и "Вниз", чтобы отрегулировать положение плеч. В это время можно также нажать клавиши режима, чтобы перейти в этот режим массажа (Шаг 4 можно сразу пропустить).

2. Описание кнопок

Кнопка

Дисплей







Пауза

Когда функция массажа запущена, нажмите клавишу "Пауза", чтобы временно остановить все функции массажа; нажмите клавишу "Пауза" еще раз, чтобы продолжить выполнение функции массажа перед паузой.



Кнопка	Функция	Описание	Дисплей
 Авто	Массаж всего тела	Глубокий массаж, который поможет восстановить жизненные силы.	Авто 01
	Китайский массаж	Техника массажа из практик традиционной китайской медицины, которая воздействует на мышцы спины и поясницы, чтобы улучшить кровообращение и снять скованность мышц.	Авто 02
	Днем	Массаж с помощью техник разминания и похлопывания, а также воздействия на акупунктурные точки Шэнь, для снятия нагрузки и восстановления сил во время дневной работы. Подходит для офисных работников. Интенсивность массажа очень нежная.	Авто 03
	Перед сном	Нежный массаж, направленный на максимальное расслабление тела перед сном.	Авто 04
	Тайский массаж	Сочетание мягкого давления воздушных подушек и глубокого воздействия массажных роликов в различных техниках ручного тайского массажа.	Авто 05
	Массаж шеи и плеч	Благодаря эффективному массажу шейного отдела позвоночника и лопаток можно снять боль и усталость в шее и плечах.	Авто 06
	Уход за позвоночником	Забота о здоровье позвоночника и компенсация недостаточной физической активности.	Авто 07
	Уход за поясницей	Изолированное воздействие на мышцы поясницы для снятия боли и укрепления мышц.	Авто 08
	Аэромассаж	Массаж всего тела с использованием воздушных подушек для перекрестной циркуляции разминания и надавливания, чтобы улучшить кровообращение, облегчить боль в различных частях тела и снять мышечную усталость.	Авто 09
	60+	Подходит для пожилых людей и людей с болями в спине и пояснице. Сила массажа умеренная.	Авто 10
	Восстановление от усталости	Восстанавливается все тело от усталости и боли; достигается расслабление, улучшается микроциркуляция и быстро снимается усталость со спины и конечностей.	Авто 11
	Фитнесс для бедер и ног	Эффективный массаж ягодиц и бедер придает форму телу и регулирует накопление избыточного жира в организме.	Авто 12
	Облегчение состояния ног	Подходит для малоподвижных людей с низкой нагрузкой на ноги и ступни, он не только снимает боли в шейном отделе и пояснице, но и успокаивает ноги и ступни. Нежная интенсивность массажа.	Авто 13

Кнопка	Функция	Описание	Дисплей
 Авто	Поддержание формы	С помощью массажа всего тела вы сможете расслабить тело и мысли и насладиться процедурами высочайшего уровня. Он подходит для женщин, а интенсивность массажа очень нежная.	Авто 14
	В офисе	При длительном сидении в офисе массаж компенсирует нехватку физической активности и улучшает общее самочувствие.	Авто 15
	Перезагрузка	Глубоко массируйте все тело с помощью приемов разминания, похлопывания и надавливания пальцами, чтобы улучшить циркуляцию крови по всему телу и предотвратить образование тромбов. Он подходит для людей, которые долгое время находятся дома и не любят выходить на улицу. Интенсивность массажа умеренно нежная.	Авто 16
	VIP	Массажные ролики в сочетании с воздушными подушками, музыка, воспроизводимая при подключении по Bluetooth, расслабляет после физического и психологического давления в результате профессиональной деятельности.	Авто 17
	Релакс	Подогрев, мягкое разминание, надавливание на зажатые точки для расслабления.	Авто 18
	Уход за бедрами	Глубокий разминающий массаж ягодич для расслабления мышц бедер и придания им тонуса.	Авто 19
	После спорта	Быстрое снятие усталости после тренировки.	Авто 20
 Техника	Выбор ручной техники массажа	Стоп	Стоп
		Разминание	Разминание
		Постукивание	Постукивание
		Разминание и постукивание	Разминание и постукивание
		Шиацу	Шиацу
		Ударная техника	Ударная техника
		Ударная техника 2D	Ударная техника 2D
		Разминание и ударная техника	Разминание и ударная техника
		Постукивание 2D	Постукивание 2D
Разминание и постукивание 2D	Разминание и постукивание 2D		
 Скорость массажа	Скорость массажа	Регулировка скорости массажа, 5 уровней регулировки.	

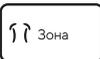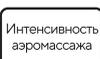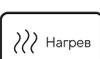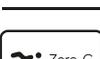Кнопка	Функция	Описание	Дисплей
	Интенсивность ролик. массажа	Регулировка интенсивности роликового массажа, 5 уровней регулировки.	
	Область массажа	<p>Фиксированная точка: Массаж в фиксированном положении.</p> <p>Частичный: Массаж ограниченной области спины.</p> <p>Верхняя часть спины: Массаж верхней части спины.</p> <p>Нижняя часть спины: Массаж поясницы.</p> <p>Полный: массаж всего тела.</p>	<p>Фиксированная</p> <p>Частичный</p> <p>Верхний</p> <p>Нижний</p> <p>Полный</p>
	Вверх	Перемещение массажной каретки вверх	—
	Вниз	Перемещение массажной каретки вниз	—
	Интенсивность аэромассажа	Регулировка интенсивности аэромассажа (5 уровней интенсивности), отключение аэромассажа.	
	Нагрев	Включение, регулировка и отключение подогрева.	
	Подъем сидения	Подъем сидения и опускание ножного блока.	—
	Опускание сидения	Опускание сидения и подъем ножного блока.	—
	Длина ножного блока	Регулировка длины ножного блока.	—
	Zero-G	Включение/выключение и выбор режима “нулевой гравитации” (3 режима)	—
	Bluetooth	Короткое нажатие: включение/выключение Bluetooth	—
	Голосовое управление	Долгое нажатие: включение/выключение голосового управления	—

3. Режим голосового управления

Когда массажное кресло включено или находится в режиме ожидания, произнесите голосовую команду "Hi Alice" или "Hey Alice" ("Привет, Алиса"), которая активирует функцию голосового управления.

После успешного включения этой функции массажное кресло ответит: "I'm Here" ("Я здесь"). В этот момент, если в течение шести секунд произнести соответствующую команду голосового управления, соответствующая функция будет запущена после ответа от массажного кресла; если в течение шести секунд не вводится правильная команда голосового управления, функция голосового управления автоматически отключается и ее нужно включить снова.



Примечание

При использовании голосового управления, используйте английский язык и умеренную скорость речи.

Команда	Ответ
Message on	Ok, message on
Message close	Ok, message close
Comfort Massage	Ok, comfort massage
Relax massage	Ok, relax massage
Full body massage	Ok, full body massage
Neck and shoulder massage	Ok, neck and shoulder massage
Back and waist massage	Ok, back and waist massage
Stretch massage	Ok, stretch massage
Fixed massage	Ok, fixed massage
Open the air pressure	Ok, open the air pressure
Close the air pressure	Ok, close the air pressure
Up the seat position	Ok, up the seat position
Down the seat position	Ok, down the seat position
Change the other mode	Ok, change the other mode
Go little down	Ok, go little down
Go little up	Ok, go little up
Stop adjustment	Ok, stop adjustment

4. Воспроизведение музыки и аудио через Bluetooth

Войдите в главное меню смарт-устройства. Откройте "Настройки" и выберите опцию "Bluetooth". Откройте "Bluetooth", и Bluetooth автоматически выполнит "Поиск нового устройства Bluetooth".


Смарт-устройство выполнит поиск соответствующей модели Bluetooth (например, IMCM-XXXX). Нажмите на кнопку "Синхронизировать". Если появится вопрос, нужно ли синхронизировать данные с устройством, просто выберите "Синхронизировать", чтобы завершить синхронизацию.

Откройте "Музыкальный проигрыватель" на смарт-устройстве и выберите песню для воспроизведения.


5. Завершение массажа

Во время массажа нажмите клавишу питания, чтобы выключить его. Немедленно отключаются все функции массажа, сбрасывается положение сидения и ножного блока (по истечении времени массажа все функции массажа автоматически отключаются, но положение сидения и ножного блока не сбрасывается).


Отключите питание всего устройства, как показано на рисунке ниже.

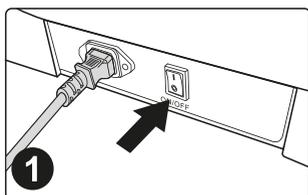

1
Переведите выключатель в положение "0"

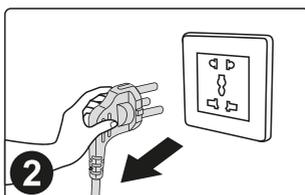

2
Извлеките вилку питания из розетки

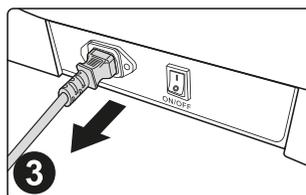

3
Отсоедините шнур питания от кресла

Очистка и техническое обслуживание

Очистка деталей из синтетической кожи и пластика

Протрите покрытие из кожи мягкой сухой тканью.

Не используйте для чистки устройства химические вещества, такие как растворители, бензин, спирт и т.д.

При использовании имеющихся в продаже средств по уходу за кожей (тряпок), пожалуйста, следуйте инструкциям по применению.

Если синтетическая кожа сильно загрязнена, протрите ее следующим образом.

Опустите мягкую ткань в воду или горячую воду, содержащую от 3 до 5% нейтрального моющего средства, затем тщательно отожмите ее.

Используйте вышеуказанную мягкую ткань для протирания кожаной поверхности.

Сотрите чистящий раствор тряпкой, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.

Протрите мягкой отжатой тканью.

Дайте изделию высохнуть на воздухе естественным путем.

Если пятна трудно удалить, погрузите имеющуюся в продаже меламиновую губку в нейтральное моющее средство, а затем протрите ей устройство.

Не используйте фен для сушки поверхности.

Соблюдайте осторожность при протирании устройства джинсовой тканью и цветными тканями, так как цвет ткани может оставить пятна на поверхности синтетической кожи.

Не допускайте длительного контакта этих деталей с пластиком, так как это может привести к обесцвечиванию.

Синтетическая кожа может обесцвечиваться, поэтому при использовании краски для волос, накройте участок соприкосновения полотенцем.



Устранение неисправностей

Неисправность

Решение

Когда механизм массажа ног или спинка достигнут определенного положения, нажмите соответствующую кнопку регулировки, и кресло зафиксируется, а также будет раздаваться непрерывный звуковой сигнал "бип, бип".

Благодаря особенностям конструктивного исполнения изделия и эргономических требований данное изделие имеет ограниченную защиту для предельного положения регулировки. В то же время при достижении предела раздается звуковой сигнал с напоминанием.

Эта функция не работает или некоторые функции не работают после включения устройства.

После включения устройства нажатием кнопки включения необходимо вручную выбрать автоматическую программу массажа или другой режим работы. При простое устройство автоматически выключается через 20 минут. Если выбран ручной режим работы, то функции, которые не выбраны, могут быть отключены, и режим работы необходимо установить вручную в ручном режиме.

При регулировке положения устройство издает звук трения кожи.

В этом изделии использована высококачественная антикоррозийная кожа, отвечающая требованиям охраны окружающей среды. Вследствие особенностей, присущих кожаным материалам, из-за трения при относительном перемещении будет слышен обычный легкий шум, что является нормальным явлением. Примечание: Если во время работы устройства вы слышите звук рвущейся ткани или кожи, немедленно прекратите его использование и обратитесь за профессиональным техническим обслуживанием.

Массажные ролики не доходят до плеч или шеи.

Если голова не касается подголовника или спина не касается спинки сиденья, положение плеч может быть ниже фактического положения в процессе определения формы тела. Сядьте как можно глубже на сиденье, положите голову на подголовник и начните сначала.

Устройство повреждено. Шнур питания или вилка в розетке слишком сильно нагреваются.

Во избежание несчастных случаев обязательно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Название	Массажное кресло Ergonova
Модель	ErgoLine
Номинальное напряжение	220-240В~ 50/60Гц
Мощность	120 Вт
Класс безопасности	Класс I

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель:
ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD
No.18 Xinglong Road, Furniture Garden, Wanquan Industry Base,
Pingyang, Wenzhou, Zhejiang Province, China.

Дата производства: смотрите на упаковке.
Сделано в Китае.

тел. 8-800-700-14-29
www.ergonova.ru
info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012 г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Импортер:
ИП Штукина Елена Александровна
193318, Санкт-Петербург, ул. Бадаева 8, корпус 1А, 695



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

 **CERTIFIED**
ERGONOVA GERMANY